

## Инструкция по применению дезмата «Эко-МАСТ».

Уложить дезмат в местах прохода животных на чистую ровную поверхность. В случае отсутствия подготовленной площадки необходимо использовать настил из досок.

Приготовить дезинфицирующий раствор, соблюдая меры личной гигиены, избегая попадания раствора на кожные покровы и в глаза.

Залить готовый раствор в дезмат из расчета 25-30 литров на 1 кв.м.

Для лечебных целей в ветеринарии при поражении копытцев и межпальцевого свода крс используют 5% растворы меди, цинка сульфата или их сочетание.

С целью профилактики межпальцевого, пальцевого дерматита крс используют 2% растворы «педилайна», меди, цинка сульфата подливая раствор по мере расхода.

Частота обработки определяется ветеринарным врачом. С целью профилактики рекомендуем использовать дезматы не менее 7 дней в месяц.

При перерывах в обработке конечностей дезмат перевернуть лицевой частью вниз для свободного стока дезраствора, затем, перевернув дезмат, залить его чистой водой и повторив процедуру очистки убрать с места прохода животных.

Срок эксплуатации дезмата «Эко-МАСТ» толщиной 6 см при условии **ежедневного** прохода **1500** коров - не менее 2 месяцев.

Дезмат не теряет своих свойств после 90 тысяч проходов КРС.